




Funciones de los mandos


Mando de pie
Mando integrado de cuidador
Mando integrado de paciente
Panel de enfermería
Mando de mano
Descripción de las funciones

Mando de pie
Mando integrado de cuidador
Mando integrado de paciente
Panel de enfermería
Mando de mano
Descripción de las funciones


DIGITAL
ANALOG

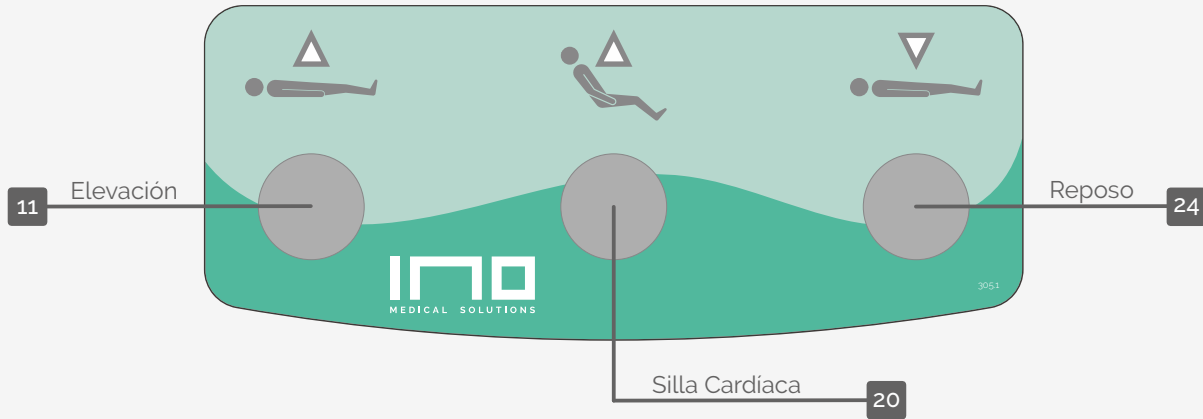


Mando integrado de cuidador

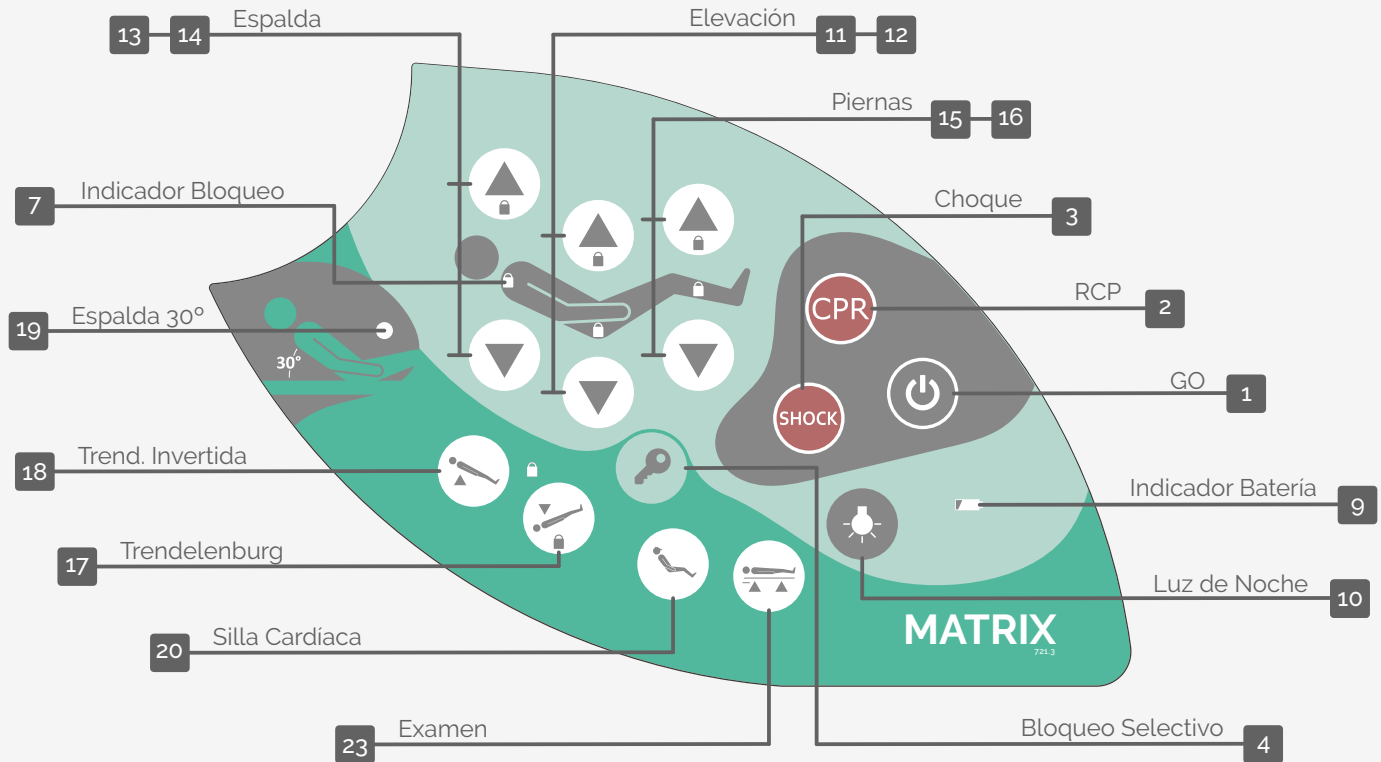


Mando integrado de paciente

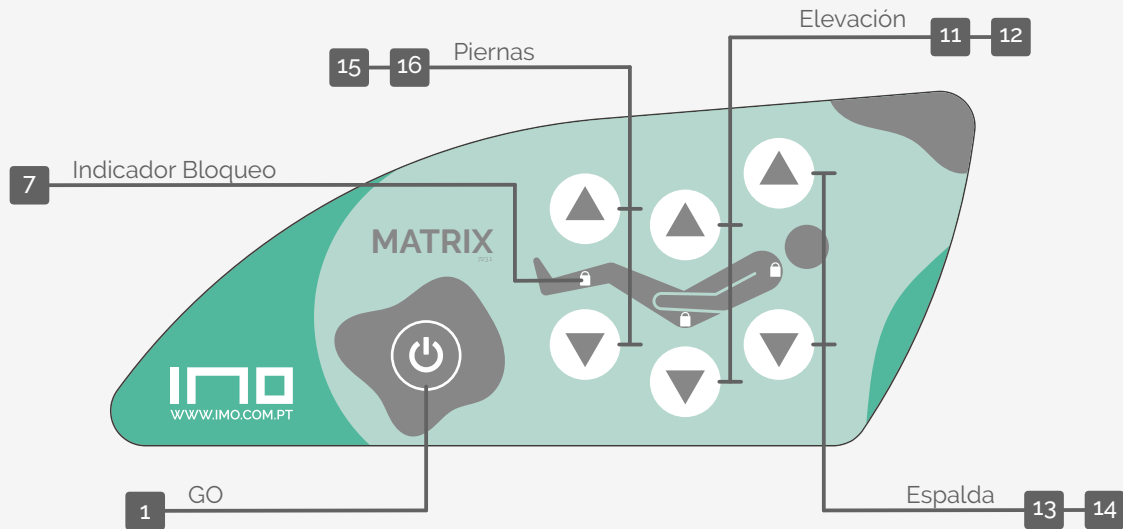

Panel de enfermería

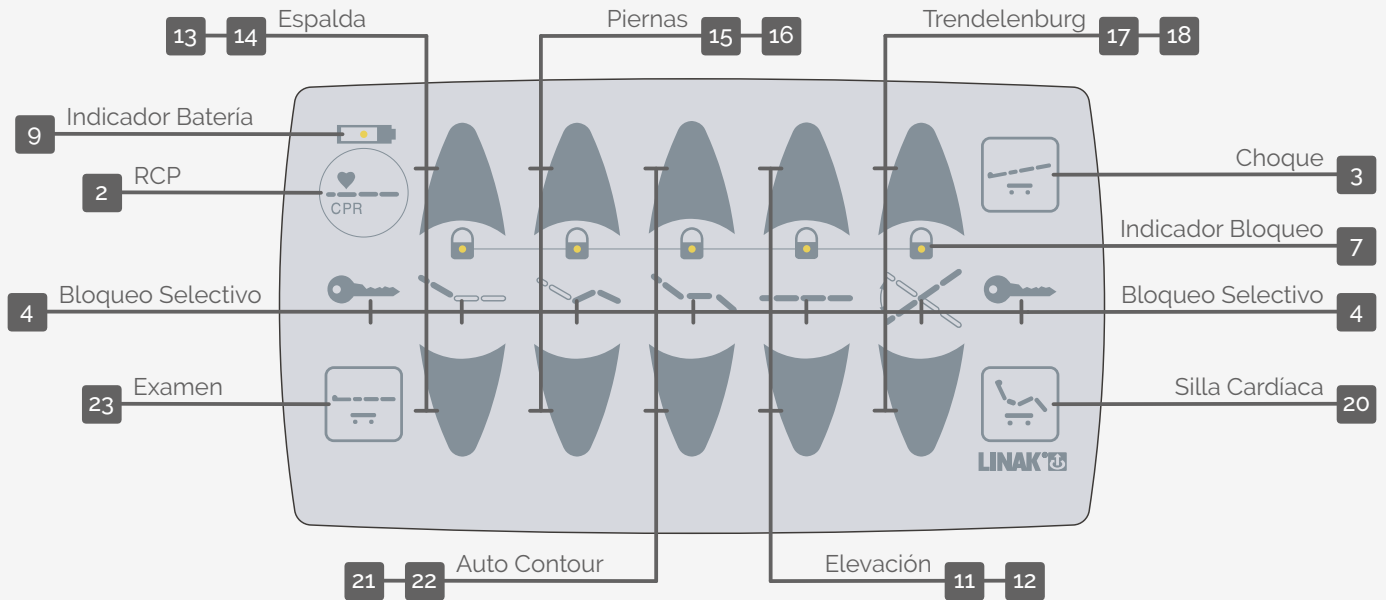


Mando de mano

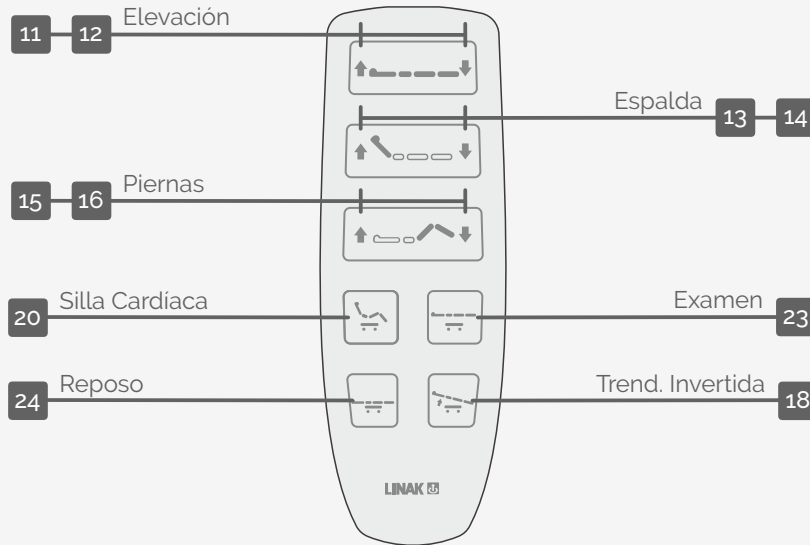


Descripción de las funciones

- GO **1** Activa las funciones de los mandos
- RCP **2** Ignora bloqueo de funciones y posiciona cama para maniobra de reanimación cardiopulmonar
- Choque **3** Ignora bloqueo de funciones y posiciona cama para tratamiento de choque
- Bloqueo Selectivo **4** Activa/desactiva bloqueo de funciones durante 2s. Cargar a continuación la función a bloquear
- Indicador Bloqueo **7** Enciende el LED cuando la función adyacente está bloqueada
- <Función> Bloqueo Sel. **8** Botones de bloqueo del panel de enfermería digital
- Indicador Batería **9** Encendido cuando tiene carga y apagado con carga máxima o descargado completamente
- Luz de Noche **10** Enciende la luz de ayuda para la entrada y salida de pacientes con posición de reposo
- Elevación ▲ **11** Levanta el lecho de la cama
- Elevación ▼ **12** Baja el lecho de la cama
- Espalda ▲ **13** Reclina la sección de la espalda


- Espalda ▼ **14** Rebate la sección de la espalda
- Piernas ▲ **15** Reclina la sección de las piernas
- Piernas ▼ **16** Rebate la sección de las piernas
- Trendelenburg **17** Baja la parte de la cabeza y sube la de los pies
- Trend. Invertida **18** Baja los pies y sube el cabezal de la cama
- Espalda 30° **19** Enciende cuando el respaldo está a 30°
- Silla Cardíaca **20** Posición de sentado que facilita la respiración y alivia la circulación sanguínea
- Auto Contour ▲ **21** Funcionalidad que sincroniza la reclinación de la espalda con la de las piernas
- Auto Contour ▼ **22** Funcionalidad que sincroniza el abatimiento de la espalda con el de las piernas
- Examen **23** Lecho nivelado y elevado. Posición recomendada para intervenciones médicas
- Reposo **24** Lecho nivelado y bajado. Posición recomendada para el paciente en período nocturno

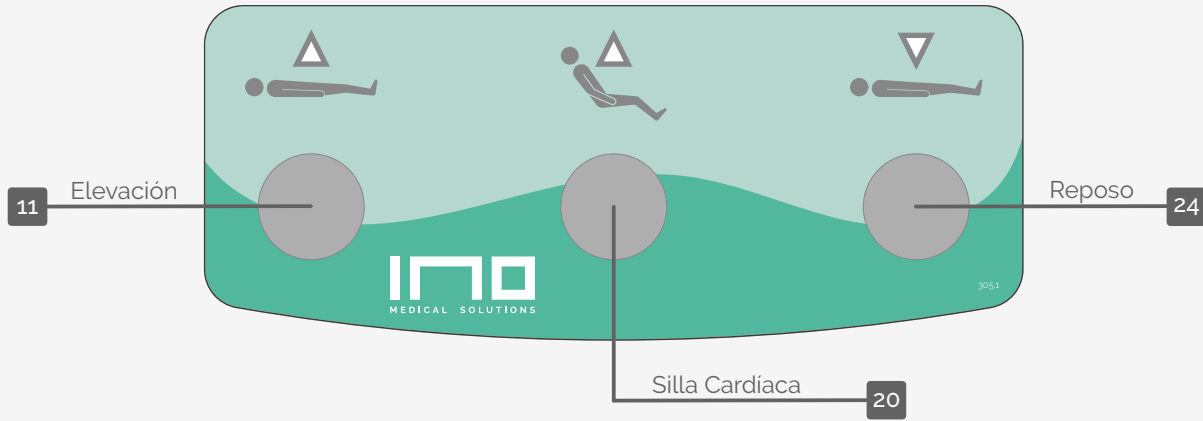


Mando integrado de cuidador

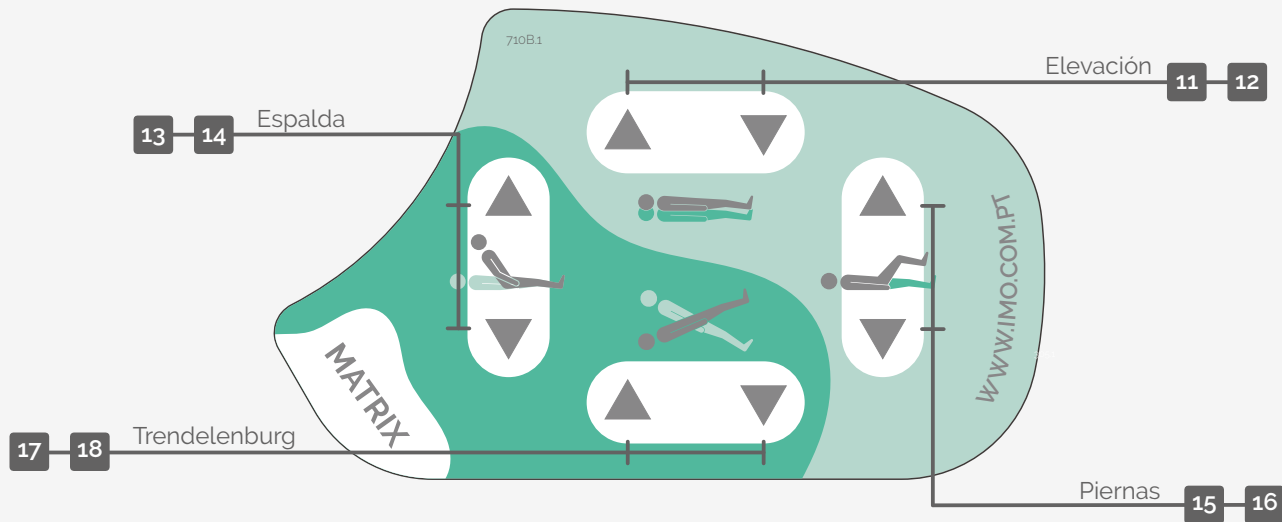


Mando integrado de paciente

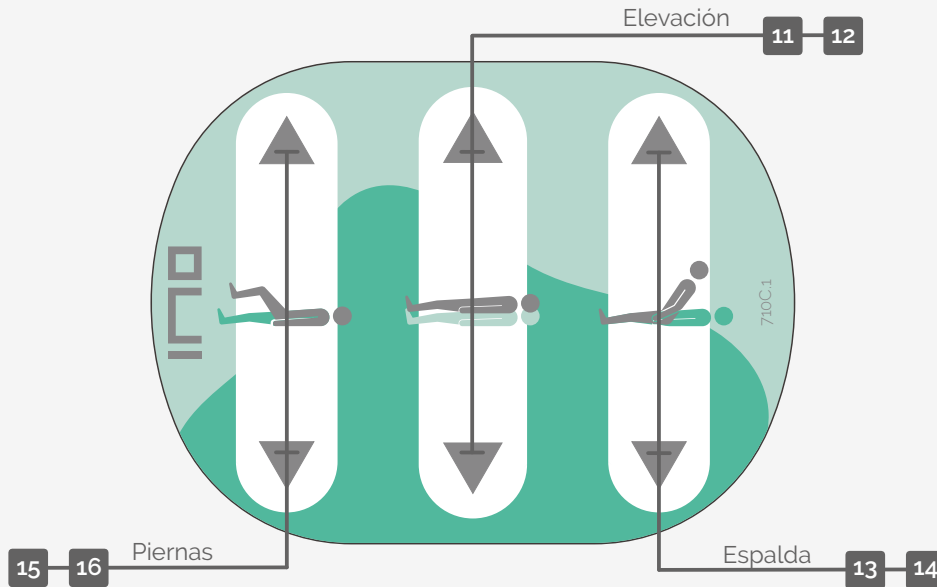

Panel de enfermería

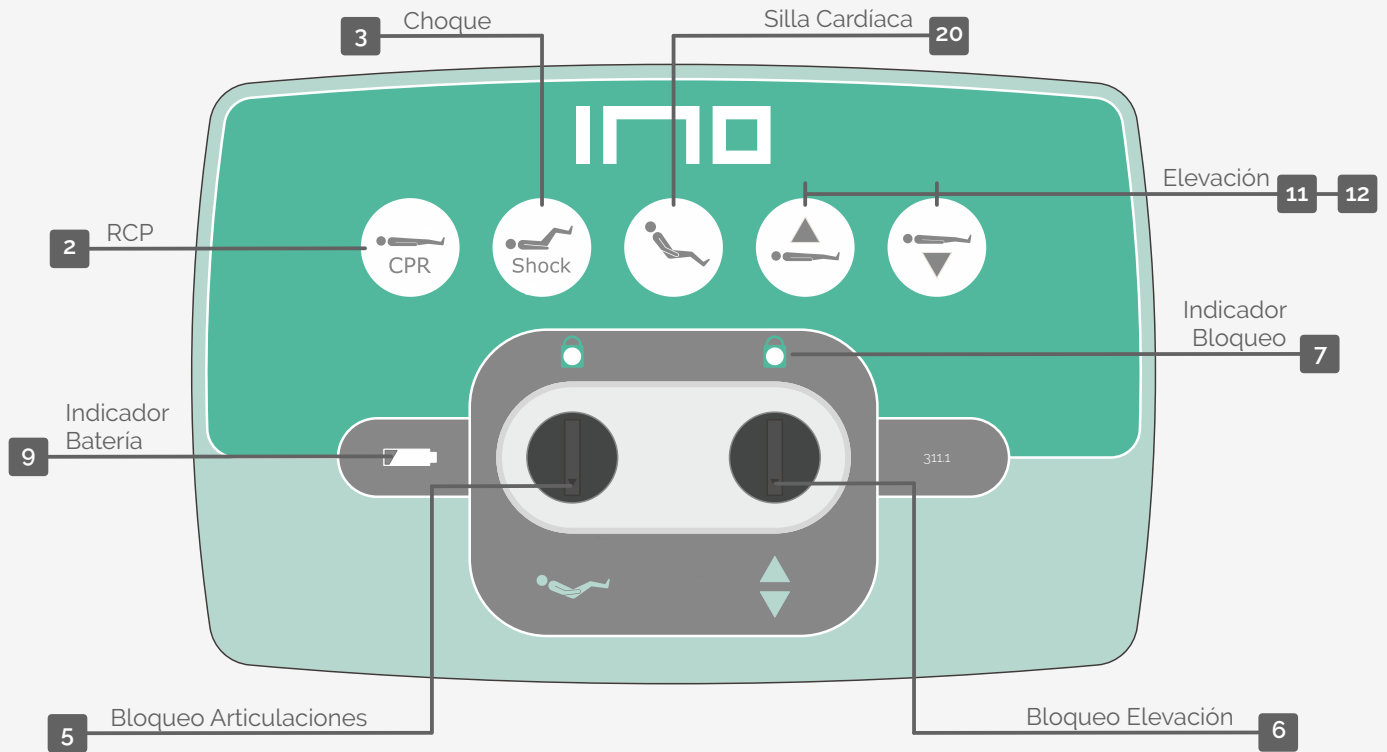

Mando de mano

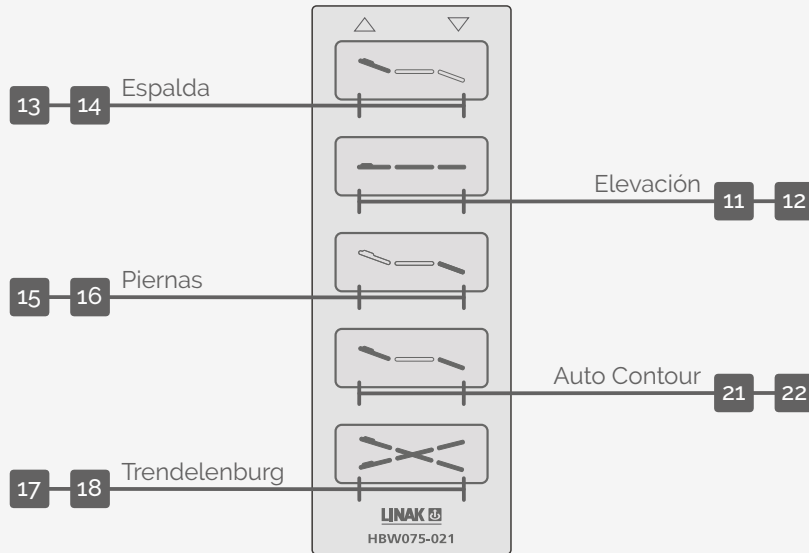

Descripción de las funciones

RCP **2** Posiciona cama para maniobra de reanimación cardiopulmonar

Choque **3** Posiciona cama para tratamiento de choque

Bloqueo Articulaciones **5** Bloquea/desbloquea las funciones de regulación de las secciones del lecho

Bloqueo Elevación **6** Bloquea/desbloquea las funciones de elevación y inclinación del lecho

Indicador Bloqueo **7** Enciende el LED cuando la función adyacente está bloqueada

Indicador Batería **9** Encendido cuando tiene carga y apagado cuando está descargado completamente

Elevación ▲ **11** Levanta el lecho de la cama

Elevación ▼ **12** Baja el lecho de la cama

Espalda ▲ **13** Reclina la sección de la espalda

Espalda ▼ **14** Rebate la sección de la espalda

Piernas ▲ **15** Reclina la sección de las piernas

Piernas ▼ **16** Rebate la sección de las piernas

Trendelenburg **17** Baja la parte de la cabeza y sube la de los pies

Trend. Invertida **18** Baja los pies y sube el cabezal de la cama

Silla Cardíaca **20** Posición de sentado que facilita la respiración y alivia la circulación sanguínea

Auto Contour ▲ **21** Funcionalidad que sincroniza la reclinación de la espalda con la de las piernas

Auto Contour ▼ **22** Funcionalidad que sincroniza el rebatimiento de la espalda con el de las piernas



IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

Central y Planta

Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande Portugal
T. +351 255 340 220
sede@imo.com.pt

Showroom

Av. Defensores de Chaves, 87A
1000-115 Lisboa Portugal
T. +351 217 963 478
lisboa@imo.com.pt